

Argen Dental lässt Kunststoffe erstrahlen

KlassePaste zum Polieren

Hygienisch – sauber – polieren! Klasse finden Zahntechniker die gleichnamige Polierpaste mit zwei Komponenten von Argen Dental.

Genutzt wird die Polierpaste im Laboralltag für alle Kunststoffe sowie Kunststoffzähne und bringt den grossen Vorteil der sauberen Bearbeitung – ohne Bimsstein. Zahntechniker nutzen die grüne KlasseBase zur trockenen Vorpolitur von Prothesenkunststoffen. Mit der rosafarbenen KlasseGlaze erfolgt der Hochglanz für die Versorgungen. Empfohlen wird für beide

Polierpasten eine weiche Polierbürste bei geringem Druck und niedriger Drehzahl. Und auch die Politur am Arbeitsplatz mit dem Handstück wird ermöglicht.

Big Points:

- Hygienischer Ersatz für die Politur mit Bimsstein
- Beste Ergebnisse bei Verwendung von Ziegenhaarbürsten
- KlassePaste ist verwendbar für Kunststoffe, Composite und Metallflächen
- Hochglänzende Oberflächen bei allen polierten Versorgungen



Die Bestellssets beinhalten:

- KlasseBase: zwei Stangen à 1200g
- KlasseGlaze: eine Stange à 1200g

www.arden.de